



Medical

Pall Kleenpak™ Wasserfilter

Einmal-Wasserfilter zum Schutz vor durch Wasser übertragene Mikroorganismen

Verwendung des Filters

- Der Filter muss so angebracht werden, dass bei der Verwendung ein Zurückspritzen zum Auslass vermieden oder minimiert wird.
 - Das Berühren des Filterauslasses während Anbringung und Verwendung muss vermieden werden.
 - Der Filterauslass darf nicht in das aufgefangene Wasser getaucht werden.
 - Die Außenoberflächen des Filters und der Konnektoren können mit Desinfektionsmitteln, die Alkohol, quaternäre Ammoniumverbindungen und nicht-ionische Tenside enthalten, gereinigt werden.
 - Wenn im Rahmen einer Desinfektion des Wassersystems die Entnahmestelle gespült werden soll, kann der Filter eingesetzt bleiben.
 - Bei hoher Kontamination des Wassers mit Partikeln, Rost oder Mikroorganismen kann eine Verringerung des Wasserdurchflusses eintreten. Dies kann die Funktionsdauer des Filters verringern.
 - Während des Gebrauchs darf der Filter nicht entfernt werden, da dies zu einer Kontamination der Auslassseite führen kann. In den Filter eindringende Luft kann die benetzte Membran auf der Anströmseite verschließen und die Flussrate signifikant verringern.
 - Gebrauchte Filter können in der mitgelieferten wiederverschließbaren Verpackung aufbewahrt werden und müssen nach den gültigen Vorschriften entsorgt werden.
- Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung.

Bestellinformation

Bestellnummer	Beschreibung	Verpackung
KAQ31F1S2	Pall Kleenpak Einmal-Wasserfilter zur Verwendung an Wasserhähnen (ohne Gewinde)	2 Stück pro Karton
KAQ31F1S	Pall Kleenpak Einmal-Wasserfilter zur Verwendung an Wasserhähnen (ohne Gewinde)	12 Stück pro Karton
KAQ31F1R2	Pall Kleenpak Einmal-Wasserfilter zur Verwendung an Wasserhähnen (mit Duschrössette)	2 Stück pro Karton
KAQ31F1R	Pall Kleenpak Einmal-Wasserfilter zur Verwendung an Wasserhähnen (mit Duschrössette)	12 Stück pro Karton

Schnellkupplungen

Typ	Beschreibung	Verpackung
TAP1/2MN	½" Außengewinde, ohne Wasserstopp	1 Stück
TAP1/2MV	½" Außengewinde, mit Wasserstopp	1 Stück
TAP1/2FN	½" Innengewinde, ohne Wasserstopp	1 Stück
TAP1/2FV	½" Innengewinde, mit Wasserstopp	1 Stück
TAP22FN	22 mm Innengewinde, ohne Wasserstopp	1 Stück
TAP22FV	22 mm Innengewinde, mit Wasserstopp	1 Stück
TAP24MN	24 mm Außengewinde, ohne Wasserstopp	1 Stück
TAP24MV	24 mm Außengewinde, mit Wasserstopp	1 Stück
TAPUC	Universalkonnektor (15 – 29 mm), gewindefrei	1 Stück

* Informationen über geeignete Schnellverschlusskupplungen erteilt Ihnen gerne Ihre regionale Pall-Vertretung.

Quick Connection, Immediate Protection.



- 1
- Schrauben Sie den Strahlregler vom Wasserhahn ab.
 - Wählen Sie eine geeignete Schnellkupplung* aus, und bringen Sie sie am Wasserhahn an.




- 2
- Waschen Sie sich die Hände



- 3
- Entfernen Sie das abziehbare Beschriftungsetikett vom Pall Kleenpak Wasserfilter, um dieses zu Ihrer Dokumentation ☹ ☹ zu nutzen und/oder die Einsatzdauer des Filters auf seinem Gehäuse zu vermerken.



- 4
- Achten Sie darauf, dass sich der O-Ring am Filtereinlass in der Rille befindet.

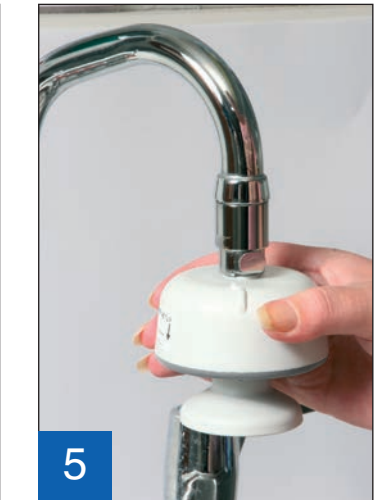

- 5
- Schieben Sie den Filtereinlass in den Adapterausgang. Ein Klicken sollte zu hören sein.
 - Nehmen Sie die Endkappe vom Filterauslass ab.



- 6
- Der Pall Kleenpak Wasserfilter (KAQ31F1S2, KAQ31F1S, KAQ31F1R2, KAQ31F1R) kann für einen Zeitraum von bis zu 31 Tagen verwendet werden.



- 7
- Drücken Sie zum Entfernen des Filters die Entriegelungstaste auf dem Adapter, um den Filter zu lösen.



- Achten Sie darauf, den Filterauslass NICHT zu kontaminieren.



- Legen Sie den Filter NICHT in das Waschbecken.

Filteria.de
Beratung | Service | Onlineshop

Vertrieb durch:

Filteria.de
Medizinischer Handel
Jürgen Single
Schulze-Delitzsch-Str. 15
71706 Markgröningen
Tel.: 07145-991 66 66
Fax: 07145-991 66 69
eMail: kontakt@filteria.de
Internet: www.filteria.de

PALL Medical

Pall International Sàrl
Avenue de Tivoli 3
1700 Fribourg, Schweiz

LifeSciences.EU@pall.com E-mail

Besuchen Sie uns im Internet unter
www.pall.com/healthcarewater

© 2010, Pall Europe. Pall, PALL und Kleenpak sind Marken der Pall Corporation. © kennzeichnet eine in den USA registrierte Marke. TM kennzeichnet eine Marke nach üblichem Recht.

11/10, PDF, GN10.3870