

Installationsanleitung Universaladapter-Set für Pall-Wassersterilfilter an Waschbeckenarmaturen

Art.-Nr.: MSF69900001



med
ishop
www.medishop.de

Anschluss Waschbeckenarmatur



metrisches Gewinde

1a



Dichtung, transparent

2a

24 M
Adapter



Aussengewinde

2b

22 F
Adapter



Innengewinde

oder

1/2 Zoll Gewinde

1b



Dichtung, schwarz

2c

1/2 M
Adapter



Aussengewinde

2d

1/2 F
Adapter



Innengewinde

oder

oder

und

3



Dichtung, rot

und

4



Schnellkupplung



Anschluss Wassersterilfilter

Installationsanleitung Universaladapter-Set für Waschbeckenarmaturen

Art.-Nr.: MSF69900001

- ➔ Deinstallieren Sie den Perlator (Sieb) an Ihrer Waschbeckenarmatur
- ➔ Vergleichen Sie das Gewinde am Perlator mit den Adaptern 2a bis 2d.
- ➔ Wählen Sie gemäß der Abbildung die passende Dichtung 1a oder 1b.
- ➔ Setzen Sie die Dichtung auf den Adapter und schrauben beide von Hand und gerade in die Armatur.
- ➔ Ziehen Sie den Adapter mit einer Zange oder einem Gabelschlüssel leicht an.
- ➔ Schrauben Sie die rote Dichtung 3 und Schnellkupplung 4 in den Adapter.
- ➔ Ziehen Sie die Schnellkupplung mit einer Zange oder einem Gabelschlüssel leicht an.
- ➔ Nehmen Sie den Filter aus der Verpackung und klicken Sie diesen in die Schnellkupplung.
- ➔ Öffnen Sie den Wasserhahn und kontrollieren Sie, ob alle Verbindungen dicht sind.

Achtung:

- ➔ Vermeiden sie ein gleichzeitiges Drehen und Ziehen am Filter bei geöffneten Wasserhahn.
- ➔ Bitte beachten Sie die angegebene Standzeit des Wassersterilfilters und wechseln diesen entsprechend.
- ➔ Den Filter nicht mehrfach Installieren (verwenden).

Tipp:

Wenn der Filter nicht mehr benötigt und im normalen Hausmüll entsorgt wurde, können alle Adapterteile demontiert und an der Luft getrocknet werden. Danach geben Sie die Teile in den mitgelieferten Polyesterbeutel für den nächsten Gebrauch/Urlaub.

Hergestellt von:



www.medishop.de

Medizinischer Handel Jürgen Single
Schulze-Delitzsch-Str. 15
71706 Markgröningen

Tel.: 0 71 45 - 991 666 0

Fax: 0 71 45 - 991 666 9

email: kontakt@medishop.de

